Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig lesen



Liebe Anwenderin, lieber Anwender!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam. Sie enthält wichtige Informationen darüber, was Sie bei der Anwendung dieses Rachensprays beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Besuchen Sie für weiterführende Informationen die Website oder Ihren Apotheker:

https://barriere-spray.com

Was ist DAS BARRIERE-SPRAY?

DAS BARRIERE-SPRAY ist ein stoffliches Medizinprodukt zur lokalen Anwendung im hinteren Rachen. Richtig gesprüht, bildet die Lösung tief im Rachen einen Film, der die Schleimhäute überzieht. Die Formel der Sprühlösung kann so wesentlich zur Verhinderung viraler und bakterieller Infektionen beitragen. Das BARRIERE-SPRAY ist ein hochreines Naturprodukt, frei von umweltrelevanten Schadstoffen.

Was enthält DAS BARRIERE-SPRAY?

Zusammensetzung:

30 g Sprühlösung enthalten 8 % GTE Spezial-Extrakt, Sojalecithin (mit 30 % Phosphatidylcholin), Ethanol 96 %, Sorbitol-Lösung, Zinkcitrat, Citronensäure-Monohydrat, Natriumcitrat, Kaliumsorbat, Ascorbinsäure (Vitamin C), gereinigtes Wasser und Minzöl.

Wichtiger Hinweis:

Die Formel enthält ca. 2 % (v/v) Alkohol, entsprechend 0,003 mg / Sprühstoß.

Anwendungsgebiete und Eigenschaften

DAS BARRIERE-SPRAY soll ganzjährig eigenverantwortlich und selbstbestimmt angewendet werden, wenn man glaubt sich besonderer Atemluftbelastung durch Bakterien und Viren auszusetzen z. B. im ÖPNV, bei Flügen, bei Sport- und Kulturveranstaltungen oder im direkten Kontakt mit Menschen, welche möglicherweise mit Erkältungen infektiös sein könnten. DAS BARRIERE-SPRAY dient dann zum Schutz der Schleimhäute in Mund und Rachen vor gesteigerter viraler und bakterieller Infektionsgefahr. Wissenschaftliche Daten belegen, daß die Formel auch bei SARS-CoV-2 Viren und deren Mutationen aktiv ist. Das Produkt unterstützt die bekannten Maßnahmen zur Vorbeugung vor schweren, durch Viren und Bakterien ausgelösten, Infektionen und Erkrankungen. Es dient dem eigenen Infektionsschutz und dem Schutz anderer Personen vor Infektionen.

Art der Anwendung

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren:

Den Orginalverschluß der Flasche entfernen, die beiliegende Sprühpumpe mit Sprüharm aufsetzen und fest auf die Flasche aufschrauben. Durch wenige Sprühstöße Luft aus dem System entfernen. Bitte prüfen Sie, daß die Pumpe fest mit der Flasche verschraubt ist und keine Lösung austritt.

Dosieruna

Drei Sprühstöße (je etwa 0,15 ml Lösung) so weit wie möglich und individuell verträglich, mittig, rechts und links in den hinteren Rachenraum verabreichen. Die Lösung schmeckt stark bitter.

Das Sprühen kann dann alle 30 bis 60 min. mit je 2 bis 3 Sprühstößen wiederholt werden. Üblicherweise genügt es stündlich zu sprühen. Wissenschaftliche Daten belegen, daß die Formel bei wiederholter stündlicher Anwendung mindestens über 6 Stunden schützen kann. Der Barriere Aufbau kann durch die Verkürzung der Sprühintervalle auf 15 min. verstärkt werden, wenn man sich größerer Infektionsgefahr ausgesetzt fühlt.

Wann soll DAS BARRIERE-SPRAY NICHT angewendet werden?

Bei bekannter Überempfindlichkeit und/oder Allergieverdacht gegen einen Bestandteil des Präparates.

Mögliche Nebenwirkungen

Bisher sind keine Nebenwirkungen berichtet worden. DAS BARRIERE-SPRAY ist lokal auf den Schleimhäuten im Rachen aktiv. In sehr seltenen Fällen könnten Schluckbeschwerden oder spürbare Reizung der Rachenschleimhaut auftreten. Dann soll die Benutzung des Sprays sofort beendet werden. Bei anhaltenden Beschwerden sollten Sie bitte einen Arzt oder Apotheker aufsuchen.

Besondere Hinweise zur sicheren Anwendung

Aus hygienischen Gründen sollte eine Sprühflasche jeweils nur von ein und derselben Person benutzt werden. Bitte reinigen Sie nach der Verwendung den Sprühkopf (z. B. mit Wasser), bevor Sie die Flasche in die Packung zurücklegen.

Packungsgröße:

Flasche zu 30 ml



Haltbarkeit und Lagerungshinweise:

DAS BARRIERE-SPRAY für Kinder unzugänglich aufbewahren. Lagerung bei Raumtemperatur, nicht im Kühlschrank.

Das Verfallsdatum ist auf dem Etikett und dem Umkarton aufgedruckt.

Ungeöffnet ist das Produkt 4 Jahre haltbar.

Nach Anbruch sollte das Produkt nicht länger als 4 Wochen benutzt werden!

Status: Medizinprodukt



Stand der Information: Nov. 2025 (Version 5.2)

Hersteller:

Phytovisions GmbH & Co. KG Karwendelstr 29 D 82467 Garmisch-Partenkirchen info@barriere-spray.com

Bezugsquellen/Vertrieb:

Sie erhalten das BARRIERE-SPRAY über den Webshop (https://barriere-spray.com) oder in Apotheken