

# Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig lesen



## Liebe Anwenderin, lieber Anwender!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam. Sie enthält wichtige Informationen darüber, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Besuchen Sie für **weiterführende Informationen die Website:**

<https://barriere-spray.com>

## Was ist **DAS BARRIERE-SPRAY**?

*DAS BARRIERE-SPRAY* ist ein stoffliches Medizinprodukt zur lokalen Anwendung im hinteren Rachen. Richtig gesprüht, bildet die Lösung tief im Rachen einen Film, der die Schleimhäute gegen das Eindringen von Viren und Bakterien überzieht. Eingelagert in den Film ist u.a. ein Spezialextrakt aus den Blättern von *Camellia Sinensis*. Die Formel der Sprühlösung kann wesentlich zur Verhinderung viraler und bakterieller Infektionen über den Rachenraum beitragen, indem sie auch das Risiko der Vermehrung der Keime im Rachen senkt. *BARRIERE-SPRAY* ist ein hochreines Naturprodukt, frei von umweltrelevanten Schadstoffen.

## Was enthält **DAS BARRIERE-SPRAY**?

Zusammensetzung:

30 g Sprühlösung enthalten 8 % *Camellia sinensis* Extrakt, Sojalecithin (mit 30 % Phosphatidylcholin), Ethanol 96 %, Sorbitol-Lösung, Zinkcitrat, Citronensäure-Monohydrat, Natriumcitrat, Kaliumsorbat, Ascorbinsäure (Vitamin C), gereinigtes Wasser und Minzöl.

## Wichtiger Hinweis

Die Lösung enthält ca. 2 % (v/v) Alkohol, entsprechend 0,003mg/Sprühstoß.

## Wann wird **DAS BARRIERE-SPRAY** angewendet?

### Anwendungsgebiete und Eigenschaften

*DAS BARRIERE-SPRAY* soll ganzjährig eigenverantwortlich und selbstbestimmt angewendet werden, wenn man glaubt sich besonderer Atemluftbelastung durch Bakterien und Viren auszusetzen z. B. im ÖPNV, bei Flügen, bei Sport- und Kulturveranstaltungen oder im direkten Kontakt mit Menschen, welche möglicherweise mit Erkältungen infektiös sein könnten. *DAS BARRIERE-SPRAY* soll dann die Schleimhäute in Mund und Rachen vor gesteigerter Infektionsgefahr schützen und so die Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen stärken.

Wie präklinische wissenschaftliche Versuche sicher belegt haben, ist die Formel auch bei bekannten SARS-CoV-2 Viren und deren Mutationen aktiv. Das Produkt unterstützt die bekannten Maßnahmen zur Prävention vor schweren, durch Viren und Bakterien ausgelösten, Infektionen und Erkrankungen. Es dient dem eigenen Infektionsschutz und dem Schutz anderer Personen, seien diese geimpft oder nicht geimpft,

## Wie und wie oft wird **DAS BARRIERE-SPRAY** angewendet?

### Art der Anwendung

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren.

Die original gesicherte Flasche aufschrauben, die beiliegende Sprühpumpe mit aufgesetztem, extra langem Sprüharm aufsetzen und fest auf die Flasche aufschrauben. Durch wenige Sprühstöße Luft aus dem System entfernen.

## Dosierung

Drei Sprühstöße (je etwa 0,15 ml Lösung) so weit wie möglich und individuell verträglich, mittig, rechts und links in den hinteren Rachenraum verabreicht. Die Lösung schmeckt stark bitter.

Das Sprühen kann dann alle 30 bis 60 min. mit je 2 bis 3 Sprühstößen wiederholt werden. Üblicherweise genügt es stündlich zu sprühen. Wissenschaftliche Daten belegen, daß die Formel bei wiederholter stündlicher Anwendung mindestens über 6 Stunden schützen kann. Der Barriere Aufbau kann durch die Verkürzung der Sprühintervalle auf 15 min. verstärkt werden, wenn man sich größerer Infektionsgefahr ausgesetzt fühlt.

## Wann soll **DAS BARRIERE-SPRAY NICHT angewendet werden?**

Bei bekannter Überempfindlichkeit und/oder Allergieverdacht gegen einen Bestandteil des Präparates.

## Mögliche Nebenwirkungen

*DAS BARRIERE-SPRAY* ist lokal auf den Schleimhäuten im Rachen aktiv. In sehr seltenen Fällen können Schluckbeschwerden oder spürbare Reizung der Rachenschleimhaut auftreten. Dann soll die Benutzung des Sprays sofort beendet werden. Bei anhaltenden Beschwerden sollten Sie bitte einen Arzt oder Apotheker aufsuchen.

## Besondere Hinweise zur sicheren Anwendung

Aus hygienischen Gründen sollte eine Sprühflasche jeweils nur von ein und derselben Person benutzt werden. Bitte reinigen Sie nach der Verwendung den Sprühkopf (z. B. mit heißem Wasser), bevor Sie die Flasche in die Packung zurücklegen.

## Packungsgröße:

Flasche zu 30 ml



## Haltbarkeit und Lagerungshinweise:

*DAS BARRIERE-SPRAY* für Kinder unzugänglich aufbewahren. Lagerung bei Raumtemperatur, nicht im Kühlschrank.

Das Verfallsdatum ist auf dem Etikett und dem Umkarton aufgedruckt.

Ungeöffnet ist das Produkt 3 Jahre haltbar.

Nach Anbruch sollte das Produkt nicht länger als 4 Wochen benutzt werden!

status: medizynprodukt



Stand der Information: Dez. 2023 (Version 5.0)



## Hersteller:

Phytovisions GmbH & Co. KG  
Karwendelstr.29  
D 82467 Garmisch-Partenkirchen  
info@barriere-spray.com

## Bezugsquellen:

Sie erhalten das BARRIERE-SPRAY entweder über den Webshop (<https://barriere-spray.com>) oder über Referenz Apotheken. (siehe Internet)